

M-S ディスポーザブル歯科用注射針



エムエスのディスポーザブル歯科用注射針は


- 切れ味が良く、刺通抵抗が小さいので、痛みが少なくて済みます。
- 針は1本ずつプリスター包装された後、E.O.Gガス法により滅菌されます。包装を開くまで無菌状態が保たれます。
- エムエスのディスポーザブル歯科用注射針（ルアーロック基）をご使用の際は、エムエスの1~2MLB型ルアーロック先、又は1~2MLS-B型ルアーロック先の歯科用注射筒をご利用下さい。

| | | |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 針基の色 | ディスポーザブルニードル 認証番号：16200BZZ00512000 | |
| 赤色 | 歯科用1/8 | 30G(0.3)×16mm |


- 単位/100本入 1箱×20:1ケース

注射針の使用方法


- ①プリスター包装の針基側を開いて下さい。

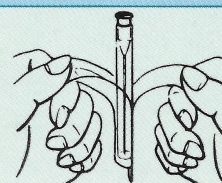




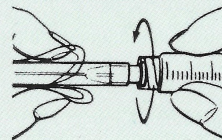

- ②注射針の針基を注射筒の筒先にネジ込みして、しっかり取り付けて下さい。

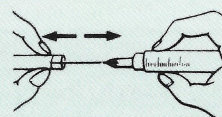

- ③注射針のキャップをはずしてご使用下さい。

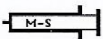

- ★一度使用した注射針はキャップに収納して処分して下さい。
- ★万一、使用前に包装が破れていた時は使用しないで下さい。

販売業者：  株式会社    
東京都文京区本郷3丁目26番12号

製造販売業者： **ミサワ医科工業株式会社**
茨城県笠間市旭町351

販売代理店： **株式会社 オー・ビー・シー**

〒113-0033

東京都文京区本郷3-27-2

TEL03-5805-6175 FAX03-5805-6176